

Skaistumkopšanas ierīce 5-vienā



Cienījamais klient!

Paldies, ka esat izvēlējies mūsu produktus.

Efektivitātes un drošības nolūkā lūdzam pirms to lietošanas izlasīt instrukciju. Saglabājiet instrukciju atsaucēs nolūkā.

Īss ievads

Injekcija bez adatas izmantošanas ir ļoti efektīva, rētas neveidojoša un droša metode, kas pilnībā novērš nepieciešamību pēc tradicionālās un mikrodatu injekcijas. Tā izmanto elektroporāciju un elektroosmozi, lai piegādātu barības vielas dziļajām ādas šūnām, nodrošinātu limfas drenāžu, veicinātu vielmaiņu, limfas cirkulāciju un uzlabotu asinsriti, samazinātu grumbas, balinātu ādu un mitrinātu to, kā arī samazinātu celulītu, veicinātu tauku sadalīšanos un svara samazināšanos. Salīdzinājumā ar atsevišķiem ādas kopšanas produktiem, tā efektīvi daudz dziļāk absorbē produktus, pilnībā atrisina produktu problēmas, paliekot epidermas līmenī, un samazina ārstēšanas perioda ilgumu.

Darba teorija

Tiek izmantota elektroporācijas un elektroosmozes metode bez jebkādām injekcijām, viegli atver akvaporīnu (AQP), piegādā ādai nepieciešamās barības vielas, kā arī ārstē visu veidu ādas problēmas. Palīdz ātri un efektīvi absorbēt barības vielas, veicina vielmaiņu ādā, saglabā ādas elastību un uzlabo stāvokli.

AQP ir galvenais mitruma kanāls šūnās un ārpus tām.

Kas ir elektroporācija un elektroosmoze? Elektroporācija — tieši iedarbojas uz ādu, nekavējoties uzlabo ādas audu uzsūkšanas spēju. Elektrošoka darbības rezultātā radīsies caurumi šūnu lipīdu mobilizācijā, un vienlaikus hidrofilā molekula, kas sākotnēji neuzsūcās, tagad var iekļūt šūnās. Pēc rašanās caurumi paliks atvērtā stāvoklī no dažām sekundēm līdz dažām minūtēm, atkarībā no elektrošoka ilguma. Elektroosmoze — galvenokārt iedarbojas uz vielas, kas tiks izkliedēta, molekulu, palīdzot tai viegli iesūkties ādā. Vienādas kvalitātes elektriskie lādiņi savstarpēji atgrūžas, tādējādi novadot pozitīvu strāvu uz pozitīvo barības vielu molekulu un “iegrūžot” barības vielu molekulu ādas audos.



Vienlaikus arī neitrālā molekula iesūksies dziļāk ādā.

Funkcija:

Vasaras raibumu likvidēšanai un ādas balināšanai: bez rētu veidošanas atver šūnu kanālus, absorbē barības vielas, piedalās šūnu vielmaiņā, veicina šūnu atdzimšanu.

Vēlamajai grumbu likvidēšanai: elektrodu barības vielas tiešā veidā iesūcas dziļi ādā, uzsāk šūnu atjaunošanu, likvidē grumbas dziļākajos ādas slāņos.

Aknes novēršanai: izmantojot elektrisko barības vielu konveijera lentu, aknes likvidēšanas destilāts tiek ievadīts centrā, novērš vai ierobežo aknes atkārtotu parādīšanos, palīdz izvairīties no infekcijas rašanās brūcē.

Mitrināšanai un šķidruma nodrošināšanai: ievada aktīvo destilātu dziļi ādā, apgādā šūnas ar pietiekamu ūdens daudzumu un novērš dažādas ādas problēmas, kas saistītas ar šķidruma trūkumu.

Dimanta dermabrāzijas darbības instrukcija

Dimanta dermabrāzijas princips

Mikrodermabrāzija ir ādu atsvaidzinoša metode, kas palīdz uzlabot sejas ādu, kas cieš no saules un novecošanās ietekmes. Plastiskās ķirurģijas speciālists izmanto tādu ierīci kā smalks smilšu strūklotājs, lai kopā ar dimanta uzgali izsmidzinātu pa sejas ādu gaisu, kombinējot maigu abrāziju ar nosūkšanu, lai noņemtu atmirušos ārējos ādas slāņus. Tāpat kā ar citām ādas atjaunošanas metodēm, var būt nepieciešama vairāk nekā viena procedūra, lai samazinātu vai likvidētu smalkās grumbas un nevēlamo pigmentāciju.

Dimanta dermabrāzijas darbība

Mikrodermabrāzija ir efektīvs veids, kā samazināt smalkās grumbas, “vārnu kājiņas”, vecuma plankumus un aknes rētas. Tā stimulē ādas šūnu un kolagēna veidošanos. Ir pierādīts, ka tā ir ļoti populāra kosmētiskā procedūra bez ķirurģiskas iejaukšanās.

Izmantojot to regulāri, šī sistēma veiksmīgi darbojas uz visiem ādas veidiem, un to var izmantot uz sejas, kakla, dekoltē zonas un visa ķermeņa jauneklīgām un svaigākam izskatam. Rezultāti būs redzami tūlīt.

Pēc procedūras izmantojiet suku ar ūdeni, lai notīrītu dimanta uzgaļus, un pēc tīrīšanas ievietojiet to 75 % spirta šķīdumā un paturiet 15 minūtes, tad izņemiet un pilnībā noslaukiet. Ievietojiet to ultravioletā starojuma sterilizatorā nākamajai izmantošanas reizei.

Dimanta dermabrāzijas darbības instrukcija



1. Elastīgi pielāgojas katrai mikrodermabrāzijas ierīcei, neatkarīgi no jūsu rīcībā esošā zīmola. Vienkārši saliekama, darbināma un viegli atrisina ādas poru aizsprostošanās problēmas.
2. Precizitāte — deviņas dažādas uzgaļa formas un dimantu kristālu izmēri, kas izmantojami dažādām ķermeņa zonām un pat acu zonai. Izvēloties atbilstošu uzgaļa numuru kopā ar pielāgojamu nosūcēju, tiek nodrošināta kontrolēta abrāzija.



Pilnīga ķermeņa mikrodermabrāzija pirms tievēšanas programmas, aknes, celulīta u. c. novēršanai.



Uzgalis acu zonai, kas īpaši paredzēts krunku, komedomu, strutaino pūtīšu u. c. likvidēšanai.



Rētu, smalko grumbu un saules bojātās ādas likvidēšanai, koncentrējoties uz plašāku ārstēšanu

3. Darbmūžs — dimanta virsma nodrošina īpaši ilgu darbmūžu.
4. Drošība

Noņemot alumīnija oksīda kristālus, nepastāv daļiņu palikšanas ādā risks. Pacientam un skaistumkopšanas speciālistam nav jāieelpo alumīnija oksīda putekļi, un procedūru telpai ir tīra. Neinvazīvā ādas kopšanas procedūra var tikt pabeigta īsā laikā un bez sāpēm. Šī ādas kopšanas procedūra ir ideāli piemērota steidzīgām personām. Nav nepieciešams ņemt brīvu laiku darbā vai ierobežot sabiedriskajās aktivitātes.

Kā tas darbojas

Ādas kārtiņas noņemšana
un nogludināšana

Dimanta uzgalis noņem atmirušās ādas kārtiņu



5. Rezultāts pēc procedūras:

Pēc atmirušā un bojātā ādas slāņa noņemšanas, kad āda ir tīra un gluda, ādas kopšanas līdzekļa iedarbība ir ātrāka.

Dimanta dermabrāzijas darbības instrukcija



6. Šādu simptomu ārstēšana:

akne,
pigmentācija,
rētas, ādas
izstaipīšanās,
grumbas

Procedūra

1. Tvaicēšana
2. Mikrodermabrāzijas procedūra
3. Sejas krēma noņemšana tīras ādas iegūšanai
4. Sejas maska balināšanai un mitrināšanai
5. Esence



Ultraskaņas teorija

Ultraskaņas skaistumkopšanas tehnoloģija tika ieviesta skaistumkopšanā pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados un kļuva populāra, jo piedāvā plašas ārstēšanas iespējas un ātru rezultātu, kā arī augstu izārstēšanas koeficientu un procedūras vienkāršību, tādējādi padarot to par populārāko un praktiskāko metodi skaistumkopšanas jomā. Attīstoties zinātnes tehnoloģijai, tirgū sevi pieteica jaunā profesionālā ultraskaņas skaistumkopšanas instrumenta ēra. Klienti norāda, ka šo augstas kvalitātes metodi var izmantot dažādu problēmu risināšanai un lieliska izskata iegūšanai.

1. Mehāniskā iedarbība: procedūras veikšanā tiek izmantota mehāniskā 300 miljonu reižu sekundē vibrācija, lai radītu visa ķermeņa vibrāciju un veiktu īpašu šūnu masāžas funkciju, uzlabojot arī šūnu vielmaiņu un asinsriti, kā arī aktivizējot šūnas un pabarojot ādas audus, tādējādi āda staro un ir elastīga.
2. Sildošā iedarbība: ultraskaņas sildošā iedarbība, izmainot asinsvadu darbību un vielmaiņas procesu, uzlabo asinsriti un palēnina šūnu kairinājumu un mazina sāpes. Tā spēj atslābināt arī nervu muskuļus un pretoties muskuļu nervu kairinājumam.
3. Ķīmiskā iedarbība: ultraskaņas viļņiem ir arī stimulējošā iedarbība, un tas paātrina vielmaiņas procesu. Tas spēj veikt pH vērtības maiņu, padarot to sārmaināku, kā arī veicināt zāļu uzsūkšanos un uzlabot zāļu sterilizēšanas spēju.



Ultraskaņas darbības instrukcija

Ultraskaņas darbība

1. Trombu mazināšanai un izsitumu likvidēšanai: deformētu asins kapilāru ārstēšanai, izmantojot ultraskaņas pulsa signālu kopā ar piemērotu ziedi, tādējādi novēršot izsitumus.
2. Rētas vai kreveles noņemšanai: ultraskaņa ne tikai noņem sakaltušas asinis no ādas, bet arī uzlabo vielmaiņu un asinsriti, tādējādi likvidējot rētas. Ir ieteicams izmantot ultraskaņu kopā ar piemērotu ziedi, parasti 10 reižu kursa veidā un vienu reizi divās dienās.
3. Nevēlamās ādas pigmentācijas likvidēšanai: izmantojot ultraskaņu kopā ar ķīniešu tradicionālās medicīnas sejas krēmu plankumu krēmu vai augstas iedarbības krēmu ar C vitamīnu, tiek nodrošināts lielisks rezultāts nevēlamās pigmentācijas likvidēšanā. Rezultāts ir redzams pēc 3 procedūrām, bet pilnīga simptoma novēršana tiek panākta pēc 10 līdz 40 procedūrām.
4. Zemādas pleķu un pigmentācijas novēršanai: izmantojot ultraskaņu plankuma šūnas membrānas bojāšanai un aizsardzībai pret tā formas veidošanos, tiek pilnībā likvidēta pigmentācija un plankums, uzlabojot arī vielmaiņas darbību. Izmantot 10 reižu kursa veidā un tad atpūtināt ādu vienu nedēļu pirms vēl vienas procedūras veikšanas.
5. Smalku grumbu un sarecējušas asins noņemšanai, kā arī ādas elastības uzlabošanai: izmantojot ultraskaņas mehānisma masāžās iedarbību, no vienas puses tā regulē zemādas šūnu membrānas izmaiņas un no otras puses — uzlabo asins cirkulāciju un vielmaiņu. Tādējādi tiek likvidētas nelielas grumbas, kā arī sarecējušas asinis vai rētas, ko radīja cietas vielas.



6. Maisiņu un tumšo loku ap acīm likvidēšanai: tiek izmantota ultraskaņas mehāniskās masāžas funkcija, lai uzlabotu asinsriti un limfas cirkulāciju kopā ar sildošo funkciju, lai noārdītu taukus un uzlabotu zemādas uzsūkšanas spēju, tādējādi samazinot pārmērīgo ūdens daudzumu un uzkrājušos taukus un likvidētu lokus un maisiņus zem acīm. Ar zondi maigi masēt maisiņus zem acīm ādas tekstūras virzienā. Nepieskarti tieši acs ābolam ar zondi un nedarboties ar to uz plakstiņa.
7. Tūskas vai rētu likvidēšanai: izmantojot ultraskaņu kopā ar ziedi, masēt bojātās ādas zonu aptuveni minūti, tādējādi izvairoties no rētas veidošanās tūskas likvidēšanas laikā.
8. Sklerozes un raupjas ādas ārstēšanai: izmantojot ultraskaņu kopā ar glicerīnu, šķidro vasku vai kvalitatīvu smērvielu masēt ādu, tādējādi uzlabojot procedūras rezultātu.
9. Ādas stāvokļa uzlabošanai: likvidēt plankumus un uzlabot ādas stāvokli, izmantojot ultraskaņu.

Nedrīkst izmantot:

1. Cilvēki ar osteoporozi nedrīkst izmantot šo ierīci.
2. Cilvēki ar ādas problēmām, piemēram, pušumiem, nedrīkst izmantot šo ierīci.
3. Cilvēki ar garīgām saslimšanām nedrīkst izmantot šo ierīci.
4. Procedūras laikā zonde nedrīkst atrasties virzienā pret acs ābolu.
5. Grūtniecēm nedrīkst veikt procedūras uz krūtīm, kājām un vēdera.
6. Cilvēki ar protēzēm nedrīkst izmantot šo ierīci uz attiecīgās ķermeņa daļas.
7. Cilvēki ar iekšējo orgānu problēmām nedrīkst izmantot šo ierīci uz vēdera vai krūtīm.

Ādas skrubja darbības instrukcija

Ultraskaņas ādas skrubis ir skaistumkopšanas speciālistu iecienītākais instruments. Ilgstošie pētījumi nodrošina lielisku efektu sejas kopšanā. Tas maina elektrisko vibrāciju ar 28 000 reizēm sekundē uz mehānisko vibrāciju ar 28 000 reizēm sekundē. Ultraskaņas efekts masē ādu un to attīra. Tajā pašā laikā tiek panākta iedarbība uz dziļajām šūnām. Šādā veidā ir iespējams efektīvi noņemt plankumus, grumbas, pumpas, raga kārtiņu un sārņus porās, lai jūsu āda izskatītos gaiša, attīrīta un elastīga.


Ultraskaņas masāža



1. attēls

Pīlings

Grumbu likvidēšana

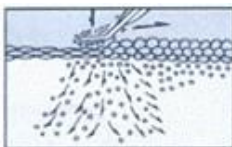

2. attēls

Melanīna likvidēšana



3. attēls



4. attēls



Aukstuma un karstuma āmuriņa darbības instrukcija



Aukstuma un karstuma āmuriņš tika izstrādāts un izgatavots pēc jaunākajām tehnoloģijām skaistumkopšanas kultūras uzplaukuma laikā 2000. gadā. Tā ir medicīniska mehāniska ierīce, tādēļ ir uzticama un droša.

Piemērošana:

1. Procedūra, izmantojot aukstuma āmuriņu
Nomierina ādu pēc apstrādes, kuras rezultātā āda tiek kairināta.
Nomierina jutīgu ādu.
2. Procedūra, izmantojot karstuma āmuriņu.
Uzlabo ādas uzsūkšanās spēju.
Uzlabo ādas stāvokli, novērš tās blāvumu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Programmas iestatīšana/izbeigšana
2. Darbības izvēle
3. Darbības izvēle
4. Ieslēgt/izslēgt
5. Parametru iestatīšana
6. Parametru iestatīšana
7. Sākt darbību/pauze
8. Displejs

9. Vilkmes noregulēšana
10. Vakuuma mērītājs
- a. Ultraskaņas procedūra sejai
- b. Ultraskaņas procedūra zonai zem acīm
- c. Ultraskaņas procedūra ķermenim
- d. Mezoterapijas procedūra
- e. Aukstuma un karstuma āmuriņa darbība
- f. Ādas skrubja darbība

Mezoterapijas procedūra



1. Pievienot ierīci elektrībai.

2. Ieslēgt ierīci.

3. Nospiegt pogu  (4. panelis)

4. Nospiegt pogu  un izvēlēties mezoterapiju (2.3 panelis)

5. Nospiegt pogu  un nonākt pie nākamās darbības saskaņā ar 1-2 attēlu.



1-1




1-2

6. Nospiegt pogu   un izvēlēties laiku/zondi/frekvenci/intensitāti. Piemēram, laika iestatīšanai, izvēlieties pogu saskaņā ar 1-2 attēlu.

7. Nospiegt pogu  , lai izvēlētos zondi un nospiegt pogu  , lai mainītu mezoterapijas ķermeņa zondi saskaņā ar b1-3 attēlu

8. Nospiegt pogu  , lai izvēlētos frekvenci un nospiegt pogu  , lai iestatītu to saskaņā ar 1-4 attēlu.

9. Nospiegt pogu  , lai izvēlētos intensitāti un tad nospiegt pogu

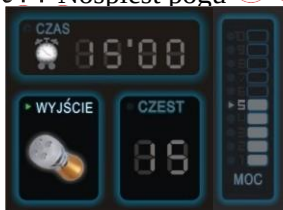

1-3



1-4



1-5

10. Nospiegt pogu  un uzsākt darbu.



Dimanta dermabrāzijas darbība

Dimanta dermabrāzijas instrukcija

1. Nospieš pogu  , lai izvēlētos dimanta funkciju saskaņā ar 1-2 attēlu (2.3. panelis)
2. Nospieš pogu , lai nonāktu pie nākamās darbības saskaņā ar 2-2 attēlu.
3. Nospieš pogu  , lai izvēlētos laiku un nospieš pogu  , lai iestatītu laiku.
4. Nosūkšanai noregulējiet pogu  (panelis 9.10)
5. Nospieš pogu  un uzsākt darbu



2-1



2-2

-
- The image shows the 'Elegante PROLINE' logo at the top, with 'Elegante' in a large serif font and 'PROLINE' in a smaller sans-serif font below it, accompanied by a red stylized 'E' icon. Below the logo are five blue-bordered boxes, each containing a different dental product:
- Top left: A white, curved dental appliance (likely a retainer or night guard) with a small 'D' icon in the top left corner.
 - Top right: A white, curved dental appliance (likely a retainer or night guard) with a small 'D' icon in the top left corner.
 - Bottom left: A set of white dental crowns or veneers arranged in a row, with a small 'D' icon in the top left corner.
 - Bottom center: A set of black dental crowns or veneers arranged in a row, with a small 'D' icon in the top left corner.
 - Bottom right: A dental implant or abutment with a yellow and black handle, with a small 'D' icon in the top left corner.



-

-



- Lapa 14

Ādas skrubja darbība

1. Nospieš pogu  , lai izvēlētos ādas skrubja funkciju saskaņā ar 4-1 attēlu.
2. Nospieš pogu , lai nonāktu pie nākamās darbības saskaņā ar 4-2 attēlu.
3. Nospieš pogu  , lai izvēlētos stāvokli/laiku/režīmu/intensitāti, piemēram, lai iestatītu laiku saskaņā ar 4-2 attēlu.
4. Nospieš pogu  , lai iestatītu laiku



4-1



4-2

5. Nospieš pogu  , lai izvēlētos režīmu   un tad iestatīt saskaņā ar 4-3 attēlu.
6. Nospieš pogu   lai izvēlētos intensitāti   un tad iestatīt saskaņā ar 4-4 attēlu.



4-3



4-4

7. Nospieš pogu  ierīce sāks darboties (7. panelis)

Aukstuma un karstuma āmuriņa darbība



1. Nospieš pogu  , lai izvēlētos aukstuma un karstuma āmuriņa funkciju saskaņā ar 5-1 attēlu.
2. Nospieš pogu , lai nonāktu pie nākamās darbības saskaņā ar 5-2 attēlu.
3. Nospieš pogu  , lai iestatītu laiku saskaņā ar 5-2 attēlu.
Nospieš pogu  , lai noregulētu laiku.



5-1



5-2

4. Nospieš pogu  , lai izvēlētos intensitāti saskaņā ar 5-3 attēlu.
5. Nospieš pogu  , lai izvēlētos intensitāti



5-3

6. Nospieš pogu  un ierīce sāks darboties (5. panelis)

Mezoterapijas darbība

Seja — balina, plankumus, noņem grumbas.

Rezerves daļa:




Laiks: 15 minūtes

Intensitāte: 6


Biežums: 15

Uzziest gelu vai krēmu

Pēc tam sākt darbu.

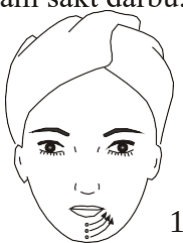

1

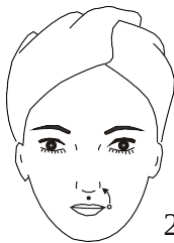

2




3



4

Mezoterapijas darbība

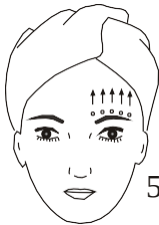

2. Seja (ādas balināšanai, mitrināšanai, gaišākas krāsas iegūšanai un grumbu likvidēšanai)

Rezerves daļa:



1. solis Noskrūvēt zeltīto daļu



Izskrūvēt stikla pudelīti



Noņemt pudeles
vāciņu



Ievietot ādas kopšanas produktu pudelītē

Laiks: 8 minūtes

Intensitāte: 5

Frekvence: 10

Zonde veic aplveida kustības.





Dimanta dermabrāzijas darbība

1. Pieslēgt elektrību galvenajai ierīcei un ieslēgt to. A attēls

2. Nospiegt pogu , lai iedarbinātu ierīci. (1. panelis)

3. Izvēlēties atbilstošu dimanta uzgali, ko savienot ar galveno ierīci un ievietot dimanta uzgalī specializēto filtra sietiņu



A attēls

Piezīme:

(A) Ja vilkmes jauda ir pārāk vāja, darbības laikā ir jānomaina filtrs.

Dažādu filtru numurs tiek noteikts, pamatojoties uz personas ādas biežumu dažādās vietās un dažādiem izmēriem. Katrai procedūrai ir atkārtoti jāpilda filtri. Pēc procedūras nolibīto ādu var aiznest klientam.

(B) Pārbaudīt, vai filtri atrodas pareizajā vietā. Stobriņa metāla savienojumu vietās var iesmērēt kādu cietu smērvielu, piemēram vazelīnu u.c.



Manuāli uzklāt smērvielu.

(C) Mikrodermabrāzijas uzgaļiem ir dažādi izmēri. Ar tausti un vizuāli novērtēt ādas zonu, parasti vispirms izvēloties raupjāku uzgali, kam seko smalkāka uzgaļa izmantošana.


4. Noregulēt vilkmes jaudu. Jo plānāka āda, jo mazāka vilkmes jauda. Mazākā jauda ir jāizmanto maisiņiem ap acīm, “vārnu kājiņām” u. c.

5. Nospiegt pogu, lai iestatītu laiku uz 15 minūtēm.

6. Nospiegt pogu , lai iedarbinātu ierīci

7. Pirms procedūras uzsākšanas jāpārbauda sūkšanas jauda uz rokas vai plaukstas. Virsmas zonai izvēlēties vidēji spēcīgu vilkmes jaudu. Esiet piesardzīgs un neturiet dimanta uzgali vienā vietā ilgāk par 15 sekundēm. Pretējā gadījumā augstais spiediens izraisīs pietūkumu vai asiņošanu.

Dabiskas un jutīgas ādas gadījumā veikt darbības saskaņā ar A attēlu.

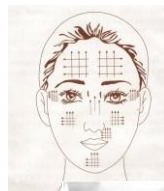



2. Procedūra zonai zem acīm

Rezultāts: ar ultraskaņu noņem tumšos maisiņus zem acīm.

- (1) Uzziest esenci vai gelu tumšo maisiņu zem acīm noņemšanai.


Zonde: zonde zonai zem acīm  Laiks: 2 minūtes

Intensitāte: 3

Vilnis: 



2. Nospieš pogu  un ierīce sāks darboties (7. panelis)

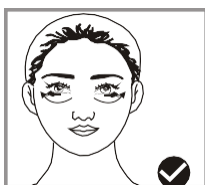

Procedūras zonai zem acīm virziens

Zonde ir jāvirza no centra uz sāniem, un katras acs zona ir jāapstrādā 1 minūti.



Ultraskaņas darbība

Procedūra: sejai

Rezultāts: gaišāka un mitrināta āda, likvidēti plankumi un grumbas. Uzziest gelu vai krēmu:

Zonde:

Laiks: 8 minūtes

Intensitāte: 4


Vilnis:



3. Nospieš pogu



un ierīce sāks darboties (7. panelis)

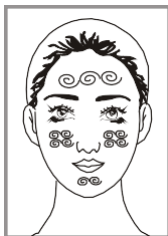

Procedūras sejai virziens

Zondei jāveic spirālveida kustības

(Piere no kreisā uz labo vaigu uz zodu)



Piezīmes: iepriekšminētie iestatījumi ir paredzēti tikai dabiskai (veselīgai) ādai. Izvēlieties jums piemērotu programmu šādā veidā:

1. Īpaši sausa āda: nobriedusi, plankumaina un novecojusies

āda. Laiks: 13–15 minūtes Intensitāte: 3.–5. līmenis ∞ Vilnis

2. Sausa āda: plānāka āda ar sarkaniem kapilāriem

Laiks: 10–12 minūtes Intensitāte: 3.–5. līmenis ∞ Vilnis

3. Taukaina āda

Laiks: 8 minūtes Intensitāte: 3.–5. līmenis ∞ Vilnis

4. Aknes skarta āda (ne pārāk jutīga)

Laiks: 8–10 minūtes Intensitāte: 3.–4. līmenis ∟∟ Vilnis

5. Jutīga āda (ne pārāk liela problēma)

Laiks: 8–10 minūtes Intensitāte: 3.–4. līmenis ∟∟ Vilnis

Ultraskaņas darbība

Procedūra vēderam:

Rezultāts: likvidēt grūtniecības radītās strijas un iegūt skaidru ķermeni. 1. Savienot zondi ar galveno ierīci.


2. Uzziest gelu vai krēmu:

Zonde:  Laiks: 8 minūtes

Intensitāte: 7 Vilnis: 



3.3. Nospiest pogu  un ierīce sāks darboties (7. panelis)

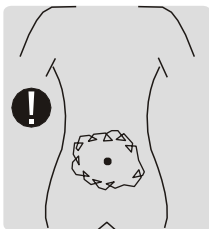



Procedūra kājām:

Rezultāts: skaistas kājas.

1. Savienot zondi ar galveno ierīci.
2. Uzziest gelu vai krēmu

Zonde:  Laiks: 8 minūtes

Intensitāte 7 Vilnis: 



3. Nospieš pogu  un ierīce sāks darboties (7. panelis)



Virzīt zondi saskaņā ar attēlu, un katra kāja ir jāapstrādā 2 minūtes.

Ultraskaņas darbība

Procedūra krūtīm:

Rezultāts: krūšu pacelšana.

1. Savienot zondi ar galveno ierīci.
2. Uzziest gelu vai krēmu.

Zonde: 


Laiks: 4 minūtes

Intensitāte: 6

Vilnis: 



- 3.3. Nospieš pogu  un ierīce sāks darboties (7. panelis)

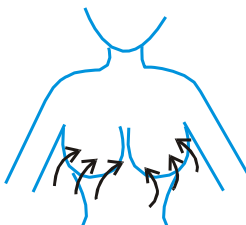

Procedūras krūtīm virziens:

Pacelt krūtis un apstrādāt tās virzienā no apakšas uz augšu, un katru krūti nepieciešams apstrādāt 2 minūtes



Procedūra sejai ar tievēšanas efektu

Rezultāts: tievēšanas efekts

1. Savienot zondi ar galveno ierīci.
2. Uzziest gelu vai krēmu.

Zonde: 

Laiks: 4 minūtes

Intensitāte: 4

Vilnis: 



3. Nospieš pogu  un ierīce sāks darboties (7. panelis)



Procedūras sejai virziens:

Pacelt vaigu kaula apakšējo daļu. Katru vaigu nepieciešams apstrādāt 2 minūtes.

Ādas skrubja darbība

Procedūra sejai:

Rezultāts: tīra āda.

1. Savienot zondi ar galveno ierīci.
2. Izsmidzināt attīrītu ūdeni uz sejas ādas un turpināt sejas mitrināšanu.

Laiks: 15 minūtes

Viļņi:



Intensitāte: 10



1. attēls



2. attēls

3. Attīrīt ādu: novietot skrubi 45 grādu leņķī pret ādu un virzīt to pret ādu (sekot 3. attēlam).
4. Pēc darbības pabeigšanas izslēgt strāvu un notīrīt skrubi.

Ultraskaņa (normālai ādai)

Rezultāts: gaišāka un mitrināta āda, likvidēti plankumi un grumbas.

1. Savienot ar galveno ierīci.

2. Uzziest gelu vai krēmu.

Laiks: 15 minūtes

Viļņi:



Intensitāte: 7



Lai saglabātu ādas skrubja kvalitatīvu darbību, tas apstāsies pēc 15 minūšu izmantošanas. Ja jums nepieciešams izmantot skrubi ilgāk, nospiediet ieslēgšanas pogu.

3. attēls

3. Ultraskaņas masāža: Apstrādāt ādu ar skrubi paralēli tai un virzīt to atpakaļ.
4. Pēc darbības pabeigšanas izslēgt strāvu un notīrīt skrubi.

Ādas skrubja regulēšana



Tā kā katra skrubja frekvence ir atšķirīga, mums ir jāpielāgo galvenās ierīces frekvence skrubja frekvencei. 1. Savienot skrubi ar galveno ierīci

2. Vienlaicīgi nospieš  un , lai regulētu frekvenci. (Uz displeja tiks parādīta pašreizējā frekvence).

3. Noregulēt frekvenci,   izmantojot pogas

$F = 26545 \text{ Hz}$



Darbības ar aukstumu un karstumu

(1) Pievienot aukstuma un karstuma āmuriņu galvenajai ierīcei. Funkcija: aukstuma un karstuma āmuriņš 

Laiks: 8 minūtes Intensitāte: 10



(2) Nospiest pogu , lai uzsāktu darbu. (5. panelis)

Darbības virziens:

Procedūra ir jāveic virzienā no sejas centrālās daļas uz sāniem, no lejas uz augšu. Masāžas metode saskaņā ar attēlu.

1. No zoda uz ausīm
2. No zoda uz degunu
3. No deguna uz deniņiem
4. No acs kaktiņa uz deniņiem



Ieteikumi sejas procedūrai



Ieteikumi procedūrai:

1. Tvaicēt ādu 5 minūtes
2. Veikt dimantu mikrodermabrāzijas procedūru 15 minūtes
3. Notīrīt ādu
4. Veikt ultraskaņas procedūru 8 minūtes
5. Notīrīt ādu
6. Veikt auksta un karsta āmuriņa procedūru 5 minūtes



Vienkāršu darbības traucējumu novēršana

Darbības traucējumi	Risinājums
Ierīce ir ieslēgta, bet nekas nenotiek	Pārlicināties, ka strāvas kabelis ir pareizi ievietots
	Pārbaudīt, vai ierīce ir ieslēgta
Nav rezultāta	Pārlicinieties, vai zonde ir pareizi savienota ar ierīci
Ierīce darbības laikā pārkarst	Tiek izmantota pārāk ilgi, nepieciešams to izslēgt un ļaut dabiskā veidā atdzist
	Pārlicināties, ka barošanas bloks ir atbilstošā kārtībā (veic speciālists)
Nav strāvas padeves	Pārlicināties, vai drošinātājs nav izdedzis un nepieciešamības gadījumā nomainīt to

Specifikācija

Spriegums: AC110V ☐ 220 V ☐ 230 V ☐ 240 V ☐

Frekvence: 50 Hz ☐ 60 Hz ☐

Jauda: 40 W

MEAS: 55,5 × 46 × 28 cm G.W: 7 KG

Iepakojuma saraksts



Nosaukums	Vienība	Daudzums	Piezīme	
Galvenā ierīce	Komplekts	1		
Mezoterapijas zonde (sejai)	gab.	1		
Mezoterapijas zonde	gab.	1		
Mikrodermambrāzijas piederumi	Komplekts	1		
Filtra sietiņš	gab.	20		
Aizvars	gab.	10	11X3	
Ultraskaņas zonde zonai	gab.	1		
Ultraskaņas zonde sejai	gab.	1		
Ultraskaņas zonde	gab.	1		
Ādas skrubis	gab.	1		
Drošinātājs	gab.	2		
Vads	viens	1		
Instrukcija	gab.	1		



Svarīgs paziņojums par drošību

1. Neizjaukt ierīci un neveikt nekādas līdzīgas darbības, kas nav norādītas mūsu instrukcijā. Visus labošanas darbus veic mūsu piesaistīti speciālisti.
2. Nesalikt šo ierīci vai nedarbināt to, atrodoties ūdens tuvumā vai ar mitrām rokām. Neliet uz tās šķidrumu.
3. Turpmāk tekstā minētajos gadījumos atvienot kontaktdakšu no kontaktligzdas un nekavējoties sazināties ar speciālistu nodaļu:
 - a. ierīce ir saskārusies ar šķidrumu;
 - b. ierīce rada neparastu smaržu, dūmus vai skaļu un spēcīgu skaņu;
 - c. kabelis ir bojāts;
 - d. ierīce ir nokritusi un salūzusi.
4. Nelikt nekādus priekšmetus uz kabeļa; nelikt ierīci blakus vietai, kur kāds var uzkāpt uz kabeļa.
5. Pēc lietošanas drošības nolūkā atvienot elektrisko kabeli no strāvas.
6. Neievietot neko ierīces ligzdā, jo tas var radīt liesmas vai pieskarties elektrībai. Ja kaut kas nokļūst ierīcē, nemēģiniet pats to izņemt, bet nekavējoties sazinieties ar izplatītāju vai mūsu uzņēmumu.
7. Nelikt ierīci uz nestabilas virsmas, jo tā var apgāzties un tikt bojāta.
8. Mūsu uzņēmumam ir tiesības veikt izmaiņas ievada informācijā pirms tās paziņošanas! Glabāt instrukcijas redzamā vietā.



MODEL:E-1002



MODEL:E-1004



MODEL:E-1010



MODEL:E-1013