

Informācija par produktu

Atsūkšanas sistēmu kopšanas līdzeklis



schülke -+

Atsūkšanas sistēmu mazgāšana,
dezinfekcija un kopšana

aspirmatic®

Mūsu Plusi:

- nesatur aldehīdus
- vienkāršs un drošs pielietojumā
- ir ieteikts ar vadošajiem zobārstniecības praksēm, kā praktiski plaši testēts produkts
- visu veidu amalgamu savācējiem
- neveido graujošas putas
- ļoti ekonomisks

Par produktu

Aspirmatic® nodrošina plašu tīrīšanu un nepieciešamu higiēnisku drošību Jūsu praksē.

Pielietojums

Ikdienas atsūkšanas sistēmu un splaujamtrauku dezinficēšanai un kopšanai [CE 0297].

Lietošanas indikācijas

Ikdienā lietošanā atsūkšanas sistēmās var nogulsneties organiskās un neorganiskās vielas, kas izžūst un piesārņo caurules, un rada inficēšanas risku darbiniekiem, nomainot filtru.

Lai izvairītos no atsūkšanas sistēmu mehāniskajām problēmām un tajā pašā laikā nodrošinātu higiēnisku drošību, aspirmatic® ir jālieto sekojoši: 2% aspirmatic® šķīdums ir jālieto katras sesijas beigās (divreiz dienā), lai izmazgātu un dezinficētu sistēmu.

Mikrobioloģiskā efektivitāte

aspirmatic® ir efektīvs pret:

- baktērijām · sēnītēm (C.albicans) (testēts saskaņā ar DGHM vadlīnijām (Vācijas higiēnas un mikrobioloģijas institūts))
- vīrusiem (t.sk. HBV, HIV un HCV)

Darba koncentrācijas/Ekspozīcijas laiks

Baktericīds, fungicīds, virucīds (t.sk. HBV, HIV, HCV)	2% - 30 min.
--	--------------

Dati par produktu

Sastāvs:

100g produkta satur: 7,5g dioktildimetilamonija hlorīds

Marķējums atbilstoši Regulai No.648/2004/EK: <5% nejonu virsmaktīvās vielas, <5% ziepes, smaržvielas. Papildus sastāvdaļas: korozijas inhibitori.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Koncentrāts

Izskats: dzidrs, zils šķīdums
pH: ap 7
Blīvums (20 °C): ap 0,99g/ml

2% darba šķīdums

Izskats: viskozs, zils šķīdums
pH: ap 8

Marķējums atbilstoši ES Direktīvām

Xi:	Kairinošs
R36/38:	Kairina acis un ādu
S26:	Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību
S37:	Strādāt aizsargcimdos

Īpaši norādījumi

Darbojoties ar dezinfekcijas līdzekļiem, kuri nav paredzēti saskarsmei ar ādu, ir jāvalkā cimdi. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Produkts	Iepakojums	Kods
2L pudele	5 x 2 L	150 102
S&M dozators	1 x 200 gab.	183 401

Aksesuāri / Dozēšanas palīg līdzekļi

	Produkta kods
Aspirmatic® sistēma	150 106
S&M dozators	183 401

Lai vieglāk un drošāk lietot līdzekli, dozators tiek ieskrūvēts pudelē. Pirms pirmās devas, noliekt pudeli ar dozatoru, lai aizpildītu dozatoru ar koncentrātu.

Vides informācija

Schülke kompānija ir apstiprināta ar vides vadības sistēmu saskaņā ar Eco Audit Regulation (Reg.No. DE-S-150 00003).

Informācija par iepakojumu

aspirmatic® līdzekli var iegādāties 2L pudelēs. Iepakojumi ir izgatavoti no polietilēna (HDPE) un ir atbilstoši marķēti. Tas atvieglo šķirošanu un ļauj nodot iepakojumus otrreizējai pārstrādei.

Vācīņi ir izgatavoti no HDPE. Etiķetes ir izgatavotas no PE. Schülke & Mayr kompānijas iepakojumu materiāli nesatur PVC, tāpēc visas pudeles un iepakojumu var nodot otrreizējai pārstrādei.

Biodegradēšanās

aspirmatic® ir viegli un pilnīgi biodegradējams (tests OECD 301 D)

Ekspertu viedokļi un pārēja informācija

Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur Jūs atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un pārskatus par aspirmatic® līdzekli: www.schuelke.lv

Jūsu jautājumiem:

Klientu apkalpošanas centrs

Tālr. 67795240

E-pasts: schuelke@interlux.lv

Web: www.schuelke.lv



Schülke & Mayr GmbH ir sertificēta atbilstoši DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 un DIN EN ISO 13485 (Reg. Nr. 004567-MP23) un ir validējusi vides vadības sistēmu atbilstoši Eco Audit prasībām (Reg. Nr. DE-150-00003).



Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany "Jaunbūmaņi", 2.korp.
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0 Dreilīgi, Stopiņu nov., LV2130
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318 Tālr. +371 67795240
www.schuelke.com Fakss +371 67795240
mail@schuelke.com schuelke@interlux.lv
www.schuelke.lv

Interlux, SIA
22840 Norderstedt, Germany "Jaunbūmaņi", 2.korp.
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0 Dreilīgi, Stopiņu nov., LV2130
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318 Tālr. +371 67795240
Fakss +371 67795240
schuelke@interlux.lv
www.schuelke.lv

Schülke&Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0)1-523 25 01- 0
Fax +43 (0)1- 523 25 01 - 60
office@schuelke.at