

## Meliseptol HBV-salvetes

**Rezerves salvetes.**

**Iepakojumā 100 salvetes.**

**Spirtu saturošs ātras iedarbības mazu virsmu dezinfekcijas līdzeklis.**

### **Raksturojums**

-Pret spirtu izturīgu mazu virsmu dezinfekcija.

-Impregnētas ar ātras darbības Meliseptol rapid dezinfekcijas līdzekli.

-Iedarbīgs pret baktērijām, mikobaktēriju (*M.terrae*), sēnītēm un vīrusiem (HBV/HIV/ HCV, rota, adeno, vaccinia, papova, noro un polio).

**- 100 salvetes impregnētas ar 211 g šķīduma.**

Sastāvs: 100 g satur 50,0 g 1-propanolu, 0,075 didecildimetilamonija hlorīdu, smaržvielas, palīgvielas (Meliseptol rapid).

**Lietošana** – atskrūvēt salvešu trauka vāciņu. Atvērt iepakojumu un ievietot salvetes traukā. No salvešu ruļļa vidus izvilkt vienu salveti caur atvērumu trauka vāciņā. Uzskrūvēt vāciņu. Veikt medicīniskās ierīces dezinfekciju.

Dezinficēšanas laiks- viena minūte.

Uzliesmojošs. Uzglabāt drošā vietā no uguns avotiem-nesmēķēt!  
Izvairīties no kontakta ar acīm. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!

**Ražotājs:** B.Braun Medical AG CH-6204 Sempach, Šveice.

**Inventarizācijas nr. 11052006/3948**