

## Informācija par produktu

Virsmu dezinfekcijas līdzeklis

# schülke



Lietošanai gatavas alkoholu saturošas dezinfekcijas salvetes

## mikroqid® AF salvetes

### Mūsu plusi:

- lietošanai gatavas, piesātinātas dezinfekcijas salvetes
- ļoti plaša biocidāla iedarbība īsākajā laika posmā
- ātri nožūst
- 150 salvetes iepakojumā/uzpildīšanas pakā

### Pielietošana

Alkoholu saturošs līdzeklis medicīnisko ierīču ātrai dezinfekcijai [CE 0297] vietās ar paaugstinātu inficēšanās risku un vietās, kur nepieciešams īss kontakta laiks, piemēram,

- Pacientu ārstēšanas iekārtām
- Apskates kušetēm
- Operācijas galdiem un blakus darba virsmām
- Medicīnisko ierīču virsmām

### Mikrobioloģiskā efektivitāte

- Baktērijas (tai skaitā TB) • Sēnītes • Hepatīta B vīrusi
- HIV • HCV • Adenovīrusi • Rotavīrusi • Papovavīrusi
- Poliovīrusi

### Ekspozīcijas laiks

Efektīvs pret	Ekspozīcijas laiks
Baktērijas, sēnītes (C.albicans) (saskaņā ar DGHM vadlīnijām pie īsām ekspozīcijas laikiem)	1 min.
MRSA	1 min.
TB	1 min.
Pilnībā virucidāls*	30 min.
Enkapsulētiem vīrusiem (tai skaitā HIV, HBV, HCV)	30 sek.
Adenovīrusi (2. tips)	2 min.
Norovīrusi**	1 min.
Rotavīrusi	30 sek.
Poliovīrusi	30 min.
Palyoma SV 40	15 min.
Vaccinia	30 sek.
<b>VAH/DGHM-List/Sertifikāts</b>	
Virsmu dezinfekcija slimnīcās un medicīnas prakses vietās	5 min.
ÖGHMP ekspertīze No. 95/8	1 min.

\* Saskaņā ar Roberta Koha Institūta vadlīnijām – German Federal Health Gazette 01/2004

\*\* Peles Nora vīruss saskaņā ar EN 14 476

# mikrozid® AF salvetes

## Informācija par produktu

Sastāvs: viena bundža/uzpildīšanas paka satur 150 lietošanai gatavas salvetes. 1 g šķīduma satur: 0,25 g etanols (94 %), 0,35 g propan-1-ols

## Kīmiskie/fiziskie dati

Aktīva sastāvdaļa:

Izskats:	dzidrs, bezkrāsas šķīdums
Blīvums (pie 20 °C):	ap 0,89 g/cm <sup>3</sup>
Viskozitāte (DIN 53 211):	< 15 sek.
Termiskā stabilitāte:	no -5 °C līdz +40 °C
pH:	ap 6,0
Uzliesmošanas punkts (DIN 51 755):	27 °C

## Lietošanas instrukcija

Noslauciet virsmu ar impregnētu audumu. Nodrošiniet pilnīgāku samitrināšanu un atstājiet to iedarboties.

Lielākām virsmām, pēc nepieciešamības, izmantojiet vairākas salvetes

## Marķēšana atbilstoši ES Direktīvām

R10: Uzliesmojošs

## Īpaši norādījumi

Nepieļaut nokļūšanu acīs. Ieteicams lietot gumijas cimdsus. Nelietot uz alkoholu jutīgam virsmām (piem., akrila stikls).

## Vides informācija

Schülke produkti ir ražoti ekonomiskā, uzlabotā, drošā un videi draudzīgā ražošanas procesa ceļā, tajā pašā laikā saglabājot augstus kvalitātes standartus.

## Ekspertu viedokļi un pārēja informācija

Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur Jūs atradīsit visu nepieciešamu literatūru un pārskatus par MikroZid® AF salvetēm:

[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

Jūsu individuālajiem jautājumiem:

Klientu apkalpošanas centrs

Tālr. +371 67795240

Epasts: [schuelke@interlux.lv](mailto:schuelke@interlux.lv)

Web: [www.schuelke.lv](http://www.schuelke.lv)



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

### Schülke&Mayr GmbH

22840 Norderstedt, Germany  
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

### Interlux, SIA

"Jaunbūmani", 2.korp.  
Dreilīgi, Stopiņu nov., LV2130  
Tālr. +371 67795240  
Fakss +371 67795240  
[schuelke@interlux.lv](mailto:schuelke@interlux.lv)  
[www.schuelke.lv](http://www.schuelke.lv)

### Schülke&Mayr Ges.m.b.H

Seidengasse 9  
1070 Wien, Austria  
Phone +43 (0)1-523 25 01- 0  
Fax +43 (0)1- 523 25 01 - 60  
[office@schuelke.at](mailto:office@schuelke.at)