

Prontosan® Wound Gel

Inovatīva brūču tīrīšana un mitrināšana
optimālai brūces sadzīšanai



Apliktu, inficētu un hronisku ādas brūču tīrīšanai,
dezinficēšanai, kopšanai un mitrināšanai

Prontosan® Wound Gel – kompetence hronisku brūču ārstēšanā

Prontosan® ekspertu komisija ir atzinusi par hronisku brūču ārstēšanas līdzekli Nr. 1

„Pateicoties līdzekļa labajai panesamībai audos ... un klīniski acīmredzamajai brūču sadzīšanas veicināšanai poliheksanīds ir klasificējams kā 1. šķiras līdzeklis slikti dzīstošu hronisku vai ļoti jutīgu brūču (piemēram, 2. pakāpes apdegumu) ārstēšanai, kā arī skalošanai.”

Avots: Konsensa ieteikumi, Zeitschrift für Wundheilung, Nr. 3, 2004



Sadzīt var tikai tīra brūce – taču vairums hronisko brūču ir piesārņotas ar brūces ekssudāta atliekām, atgrūstiem, sabiezējušiem fibrīna aplikumiem, atmirušiem audiem un sairušām šūnām. Šāds aplikums veido vislabākos priekšnoteikumus, lai savairotos fakultatīvi patogēni, īslaicīgi vai paliekoši mikrobi, kas ievērojami aizkavē dabisko brūces sadzīšanas procesu.


Ja vieglu aplikumu var optimāli noņemt ar Prontosan® brūču skalošanas šķīdumu, sakaltušas brūces skalošanas laikā sagādā lielākas problēmas. Lai tās atmiekšķētu, nepieciešams aplikumu ilgāku laiku turēt mitrumā. Šim nolūkam ideālus priekšnoteikumus nodrošina Prontosan® Wound Gel. Tā gēla konsistence ļauj uzklāt to gan seklām, gan arī dziļākām brūcēm, nebaudoties, ka tas notecēs. Brūces virskārta permanenti tiek turēta mitrumā.

Pateicoties tam, ka notiek aktīva iedarbība uz virsmu, aplikums tiek saudzīgi atdalīts un nākamajā pārsiešanas reizē vienkārši noņemts kopā ar veco pārsēju. Prontosan® Wound Gel:

- hronisku brūču tīrīšanai un mitrināšanai
- konservējošai pārsēju un brūču pārsiešanā izmantojamo materiālu mitrināšanai, piemēram, kompresu, marles, spilventiņu, sūkļu, hidrošķiedras, aliginātu, hidrokoloidu u.c., mitrināšanai
- lietošana nesagādā sāpes
- īpaša panesamība audiem, konservācijai izmantots poliaminopropila biguanīds (poliheksanīds)
- ātri absorbē nepatīkamas smakas, kas izdalās no brūces
- atkārtotai un ilgstošai lietošanai
- netraucē granulāciju un epitelizāciju
- saderīgs ar plašāk izplatītajiem brūču pārsējiem un kompresēm

Optimāla sagatavošana

Brūce vienmēr vispirms kārtīgi jāizskalo ar Prontosan® brūču skalošanas šķīdumu un jāiztīra tā, lai viegli atdalāmās aplikuma daļas pirms Prontosan® Wound Gel uzklāšanas jau būtu noņemtas. Lai līdz minimumam samazinātu baktēriju iekļūšanas iespēju, arī zona ap brūci kārtīgi jānomazgā ar brūču skalošanas šķīdumu.

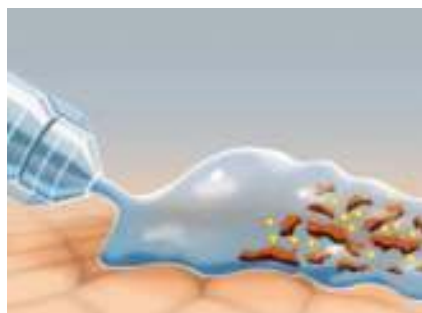


Prontosan® brūču skalošanas šķīduma aktīvā iedarbība uz virsmu nodrošina efektīvu tīrīšanu.



Lietošana uz seklām brūcēm


Prontosan® Wound Gel lietošanas veids ir atkarīgs no brūces īpatnībām. Seklām brūcēm Wound Gel tiek uzklāts uz brūces tieši no praktiskā 30 ml flakoniņa un nosegts ar sekundāro pārsēju. Brūces virsmai vienmēr jābūt pārklātai ar vismaz 3-5 mm biezu gēla kārtiņu.

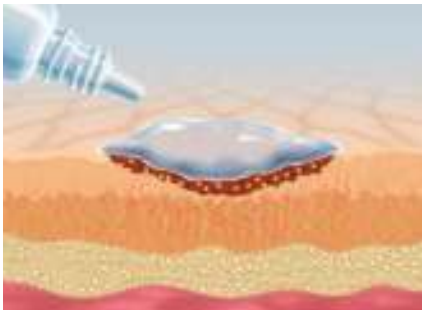

Prontosan® Wound Gel lietošana uz seklām brūcēm

Lietošana dziļās brūcēs

Lai lietotu gēlu dziļās brūču iedobēs vai kabatiņās, sacietējušais brūces aplikums arī jāpārklāj ar vismaz 3-5 mm biezu Prontosan® Wound Gel kārtiņu. Pēc tam brūce, neizdarot spiedienu, tiek apstrādāta ar tamponu un noslēgta ar sekundāro pārsēju.

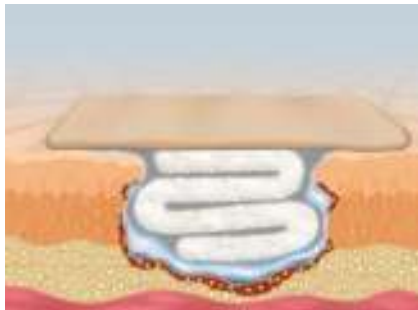

Prontosan® Wound Gel lietošana dziļās brūcēs

Norādījums par uzklāšanu

Uzklājamās gēla kārtas biežums ir atkarīgs no pārsēja nomaiņas intervāliem:

- normāla daudzuma (vismaz 3 mm) uzklāšana: ja pārsiešana notiek tajā pašā vai nākamajā dienā
- palielināta daudzuma (3-5 mm) uzklāšana: piemēram, ja pārsiešana ir paredzēta tikai pēc vairākām dienām
- gēla atlieku noņemšana

Pārsēja nomaiņas laikā viss aplikums, kā arī Prontosan® Wound Gel atliekas ir jānoņem ar Prontosan® brūču skalošanas šķīdumu. Tas jālieto tik ilgi, līdz viss aplikums un atmirušie audi kļūst viegli noņemami un brūce vizuāli izskatās tīra. Tas ir labs priekšnoteikums brūces dabiskās sadzīšanas procesam un uzlabo redzamības apstākļus ķirurģiskās audu izgriešanas veikšanai.

Prontosan® Wound Gel

Kompetence hronisku brūču ārstēšanā

Norādījumi par lietošanu

Panesamība audos un bioloģiskā saderība

Nav citotoksisks; nav kairinošs; nav uzbudinošs; nepalielina jutīgumu; nerada sāpes; nekavē granulāciju un epitelizāciju; novērtēts kā dermatoloģiski nekaitīgs. Daudzus gadus ilgā klīniskā pieredze ir apstiprinājusi, ka poliheksanīdu un undecilēnamidopropilbetaīnu ļoti labi panes arī pacienti ar ārkārtīgi izteiktām hroniskajām brūcēm.

Blakusparādības

Ļoti retos gadījumos uzreiz pēc Prontosan® Wound Gel uzklāšanas brūces virskārtā var rasties viegla, dedzinoša sajūta, taču tā pazūd jau pēc dažām minūtēm.

Kontrindikācijas

Sakarā ar to, ka nekad nevar izslēgt alerģijas iespēju, Prontosan® Wound Gel nedrīkst lietot, ja ir konstatēta alerģija vai pastāv aizdomas par alerģisku reakciju uz kādu no tā sastāvdaļām. Nelietot uz stiklveida skrimšļiem. Nelietot kombinācijā ar anjoniskajiem tensīdiem, jo tie var nelabvēlīgi ietekmēt konservāciju. Prontosan® Wound Gel nedrīkst maisīt arī ar citām brūču tīrīšanas ziepēm, ziedēm, eļļām vai enzīmiem u.tml. Attīrot brūci no šādām vielām, jānodrošina, lai ar Prontosan® brūču skalošanas šķīdumu tie tiktu pilnībā izskaloti no brūces.

Vispārīgie drošības norādījumi

Tikai ārigai lietošanai uz ādas brūcēm. Nedrīkst lietot infūzijām vai injekcijām! Nedrīkst ieelpot. Drīkst lietot tikai tad, ja iepakojums ir nevainojamā stāvoklī un nebojāts. Flakoni jāsgargā no tiešas saules staru iedarbības. – Medicīniskais produkts, klase IIb – sargāt no bērniem!

Konservācija un derīguma termiņš

Prontosan® Wound Gel ir iekonservēts tā, lai būtiski mazinātu baktēriju ievazāšanas risku no plašākas zonas lietošanas vietas tuvumā. Tas nozīmē, ka norādījumiem atbilstošas lietošanas gadījumā Prontosan® Wound Gel nodrošina starp brūci un ārstējošo personu efektīvu barjeru pret baktērijām. Kaut arī sterilitāte pēc flakona atvēršanas vairs nav nodrošināta, pateicoties iekonservēšanai, izlietošanas termiņš pēc pirmās atvēršanas ir līdz 8 nedēļām, ja vien flakons pēc katras lietošanas nekavējoties tiek noslēgts un tā atvere tiek sargāta no tiešas kontaminācijas vai tiešas saskares. Flakoni, kas bijuši saskarē ar brūci, uzreiz pēc lietošanas jālikvidē.

Norādījums

Prontosan® Wound Gel nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas.

Ražotājs: Prontomed GmbH, Am Bahndamm 70, D-32120 Hiddenhausen, tel. (0 52 21) 69 00 01, www.prontomed.de <<0344

Prontosan® Wound Gel

Dzīvs, ūdeņains, taukvielas nesaturošs gēls bez krāsas un bez aromāta ar šādām sastāvdaļām:

Sastāvdaļa un saturs	Funkcija
0,1 % undecilēnamidopropila betaīns	virsmas aktīva viela attīrošās iedarbības atbalstīšanai
0,1 % poliamīnopro-pila biguanīds (poliheksanīds)	konservants ar īpaši labu panesamību audos
Glicerols (glicerīns)	mitruma uzturēšanas līdzeklis
Aqua ad injectabilia	augstas tīrības ūdens, šķīdinātājs
Hidroksietilceluloze	gēla veidotājs uz atjaunojamu augu izcelsmes izejvielu bāzes



Piegādes formas

Art. Nr.	Vienība / iepakojums	PZN
400 505	30 ml patronas tipa flakons	2855349

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical SIA
Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1024
Tālr.: 67819549
Fakss: 67819547
Bezmaksas tālrunis pasūtījumiem
80009009
www.bbraun.com