

**STABIMED®**  
Instrumentu dezinfekcijas līdzeklis  
Nesatur aldehīdus.  
Kodīgs.

Iedarbīgs pret baktērijām, TbB, sēnītēm (*C.albicans*), vīrusiem (iesk. HCV, HBV, HIV).

**Sastāvs:** 100g šķīduma satur: Kokopropilēna diamīnu 20,0g, virsmas aktīvās vielas, šķīdinātāji, mazgājošie aktivatori, korozijas inhibitori, aromātiskās substances, krāsviela, palīgvielas.

Satur **Laurilpropilēna diamīnu**.

**Lietošana:** Manuāla

Stabimed dezinfekcijas līdzeklis paredzēts ķirurģisko instrumentu, endoskopa, laboratorijas un anestēzijas iekārtu dezinficēšanai un tīrīšanai. Piemērots tīrīšanai ar ultraskaņu.

Lietot atšķaidītu	5 min	15 min	30 min	60 min
Instrumentu dezinfekcija (iesk. TbB ( <i>M.terrae</i> ), vīrusi, Rotavīruss)		2,0% (20ml/L)	1,0% (10ml/L)	0,50% (5ml/L)
Papovavīruss		2,0% (20 ml/L)		1,0% (10ml/L)
Adenovīruss				2,0% (20ml/L)
In vitro:				
baktērijas	0,25% (2,5ml/L)			
Sēnītes ( <i>Candida albicans</i> )	0,10% (1ml/L)			
Sēnītes ( <i>A. niger, clean cong.</i> )				0,50% (5ml/L)

**Informācija:** Pēc dezinficēšanas instrumentus noskalot viscaur ar ūdeni un turpināt kā prasīts. Jebkuru pārpalikumu noslaucīt ar spirtā iemērcētu auduma salveti. Nav saderīgs ar aldehīdus saturošiem produktiem.

Viegli uzliesmojošs. Kaitīgs norijot. Rada smagus apdegumus. Pēc kontakta ar acīm, mazgāt tās ar lielu ūdens daudzumu un meklēt ārsta palīdzību. Lietot aizsargapģērbu, cimdus un acu /sejas aizsargmasku. Ja jūtaties slikti, griezties pēc medicīniskās palīdzības (ja iespējams parādīt produkta etiķeti). Neizmantojams atlikums un kontainers jāiznīcina drošā veidā. Utilizēšana: skatīt drošības datu lapā.

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.